

VENOTEKS®

ВАША ПОБЕДА НАД ВАРИКОЗОМ

Приспособление
для облегчения
надевания
компрессионного
трикотажа
HELPER

ИНСТРУКЦИЯ
ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ


venoteks.ru

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Специальное приспособление для надевания противоварикозного трикотажа – HELPER.


НАЗНАЧЕНИЕ:

HELPER – это простое в применении приспособление, которое значительно упрощает процесс надевания компрессионных изделий, экономит силы и время, а также является оптимальным решением для пациентов с ограниченными двигательными возможностями.

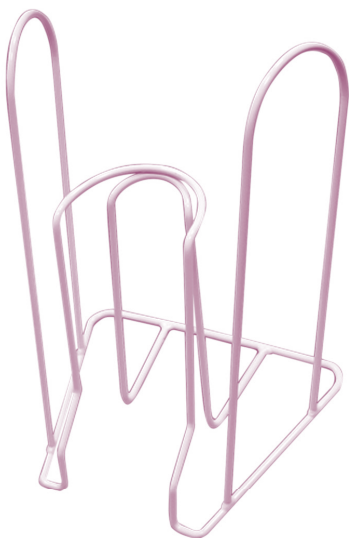


ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ:

1. Расположите приспособление HELPER дугообразной частью к себе.
2. Поместите компрессионное изделие носком вперед, пяткой к себе, выверните изделие наизнанку и натяните его на рамку до появления пяточной части, как показано на рисунке.


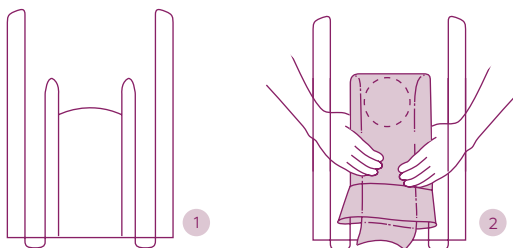


3. Поставьте приспособление HELPER на пол пяткой к себе. Вставьте носок ноги в носок чулка.
4. Опустите стопу до пола.


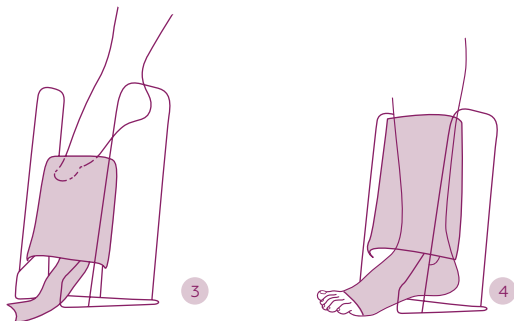


5. Потяните за ручки устройства вертикально вверх, чтобы натянуть чулок до середины голени.

6. Отклоните основание приспособления для надевания трикотажа – HELPER назад. Уберите устройство.

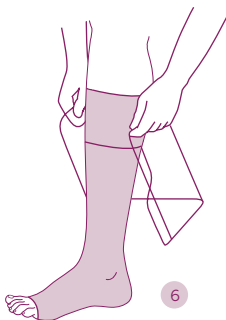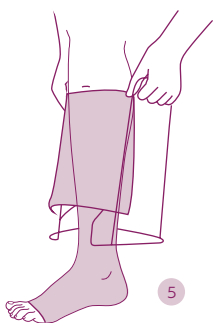

7. Теперь обеими руками берите чулок изнутри и тяните его к колену. Аккуратно натягивайте компрессионное изделие выше колена, устраняя складки, образовавшиеся в области сгиба под коленом. При надевании чулок не тяните за ажурную резинку во избежание отрыва резинки от чулка.

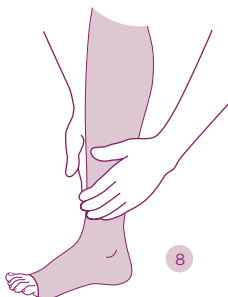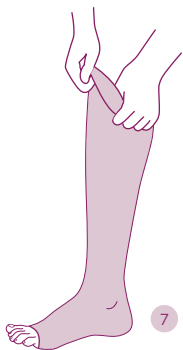

8. Равномерно расправьте изделие вверх по ноге.

9. Окончательно разгладьте чулок.

УХОД:

1. Не допускайте царапин и заусенцев на поверхности приспособления, так как нарушение гладкой поверхности может привести к повреждению надеваемых компрессионных противоварикозных изделий.
2. В случае загрязнения приспособления, протрите его слегка влажной мягкой тканью, смоченной в теплой воде с детским мылом.
3. Не допускайте нагревания приспособления, это может привести к его деформации и повреждению поверхностного слоя.
4. Не допускайте механического или иного воздействия на приспособление, которое может привести к деформации приспособления или нарушению его целостности.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:

12 месяцев с момента продажи, при соблюдении инструкции.

Гарантийными случаями не являются:

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению; дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

СРОК СЛУЖБЫ:

Срок службы не менее 3-х лет.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

Поставляется в комплекте: приспособление для облегчения надевания компрессионного трикотажа HELPER, пакет для переноски и хранения приспособления, инструкция по эксплуатации.

СОСТАВ:

Сплав металлов, покрыт белой краской.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Утилизировать с бытовым мусором.

ХРАНЕНИЕ:

Приспособление следует хранить и использовать в соответствии с гигиеническими требованиями и инструкциями по работе с металлическими изделиями. Так как условия и способы использования приспособления не могут быть проконтролированы компанией-производителем, ответственность за безопасность и сохранность несет пользователь.

Храните изделие в упаковке, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Не ставьте на приспособление предметы, которые могут его повредить.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ:

Продукция не относится к объектам обязательной сертификации.

**К ВНЕШНЕМУ ВИДУ
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ**

**С ИНСТРУКЦИЕЙ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОЗНАКОМЛЕН**

Дата покупки _____

Подпись покупателя _____

Изготовитель: Рехард Технолоджис ГмбХ, Потсдамер
штрассе, 92, Д-10785, Берлин, Германия.

Импортер:

ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская
область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

Претензии направлять:

Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД»
представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112,
e-mail: skk@nikamed.ru.